



Pokyny zabalenie prístroja pred odoslaním na kalibráciu

Príprava prístroja

- Vypnite prístroj, odpojte zo siete napájací kábel.
- Jemne očistite povrch prístroja a slúchadiel od bežných nečistôt.
- Káble od slúchadiel a patientskeho tlačidla **nezalamujte** - zviňte ich do voľných kruhov.
- Pri kompletizovaní zásielky sa riadte **checklistom na zabalenie**, ktorý nájdete na druhej strane
- Po vložení všetkých súčastí zásielky do krabice vyhotovte fotodokumentáciu

ZÁSADY SPRÁVNEHO BALENIA

Dobré umiestnenie

- ✓ Prístroj musí zostať vo vonkajšom balení v pevnej polohe
- ✓ Počas prepravy by nemalo dôjsť k pohybu obsahu o viac ako 2 cm „skúška potrasením“ pomôže odhaliť nesprávne umiestnený obsah zásielky
- ✓ Obsah by sa nemal dotýkať žiadnou stranou vonkajšieho obalu – uistite sa že ochranná výplň je okolo všetkých strán prístroja, vrátane spodnej

Primeraná výplň

- ✓ Výplň musí byť schopná absorbovať nárazy a vibrácie, použiť môžete bublinkovú fóliu, molitan, polystyrén, vzduchové vankúšičky, dostatok hrubej textílie a pod.
- ✓ Z každej strany prístroja by malo byť aspoň 5cm výplne
- ✓ Slúchadlá a kostný vibrátor sú najcitlivejšie časti zásielky, uistite sa, že sú zabalené samostatne a priamo sa nedotýkajú prístroja.

Vonkajší obal

- ✓ Zvoľte správnu veľkosť vonkajšej krabice, použite ideálne originálne balenie v ktorom Vám bol prístroj dodaný
- ✓ Opätovné použitie starých kartónov je v poriadku, za predpokladu že sú v dobrom stave a nemajú žiadne diery alebo trhliny.
- ✓ Použite aspoň trojvrstvový kartón, ideálne však päťvrstvový
- ✓ Uistite sa, že ste krabicu správne zalepili okolo celého obvodu „do kríža“



!! Pokračujte na checklist na ďalšej strane !!



Checklist na správne zabalenie prístroja

- Vypnite a odpojte audiometer z elektrickej siete.
- Vyhotovte fotku zapojenia káblov do zadného panelu na audiometri, prípadne prepojenia s panelom na audiometrickej kabíne.
- Vložte prístroj do vhodnej krabice s výplňou podľa pokynov na prvej strane
- Uistite sa, že ste obsiahli všetko príslušenstvo k prístroju:
 - Samotný prístroj
 - Slúchadlá pre vzdušné vedenie *(ak máte dva páry, pribalte obidva)*
 - Kostný vibrátor *(ak je súčasťou)*
 - Tlačidlo pacienta
 - Zdroj napájania / kábel**
 - Externý zdroj rečovej audiometrie *(ak sa používa napr. prehrávač CD)*
 - Návod a inú dokumentáciu (ak máte k dispozícii)
- Vyhotovte fotodokumentáciu otvorenej krabice s vloženým príslušenstvom a výplňou
- Správne zalepte vonkajší obal okolo celého obvodu
- Vyhotovte fotodokumentáciu vonkajšieho obalu
- Odošlite zásielku na adresu nižšie:
CONIMEX s.r.o
Kapitána Jaroša 3A
974 11, Banská Bystrica
metrologia@conimex.sk
048 / 414 27 17